



a GD Medical Pharma company

# VERAFLO™ THERAPY

The only therapy  
which is better than V.A.C.

THE EVOLUTION  
OF WOUNDTHERAPY



Acelity™

# V.A.C. VERAFLLO™ Therapy



- Reinigen van de wond d.m.v. instillatie van lokale wond reinigers op een consistente en gecontroleerde manier




- Behandelen van de wond d.m.v. instillatie van een daartoe geschikte lokale antimicrobiële en antiseptische vloeistof en het verwijderen van infectieus materiaal



- Genezen van de wond en voorbereiden voor vertraagd primair of secundair sluiten



## Fases van V.A.C. VeraFlo™ Therapy:

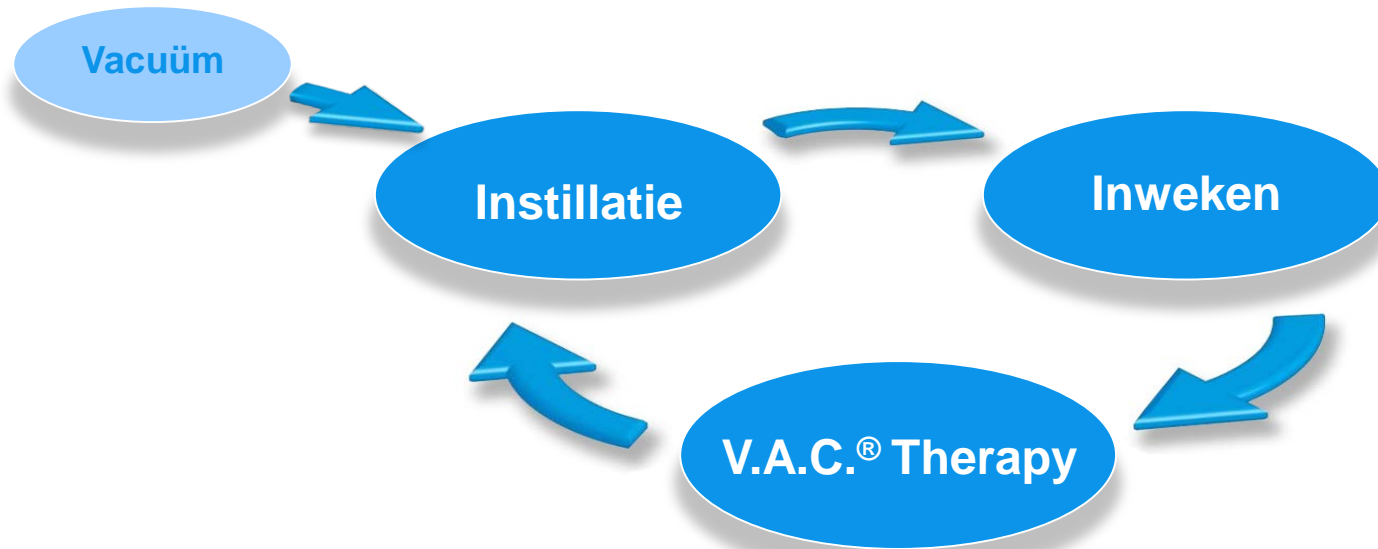

Cyclus herhaalt  
zichzelf automatisch

# V.A.C. VERAFLU™ Therapy met de V.A.C.ULTA™




Ophangstelsysteem  
voor  
vloeistoffen

Ophangstelsysteem



V.A.C.  
VERALINK™  
Cassette

Canister

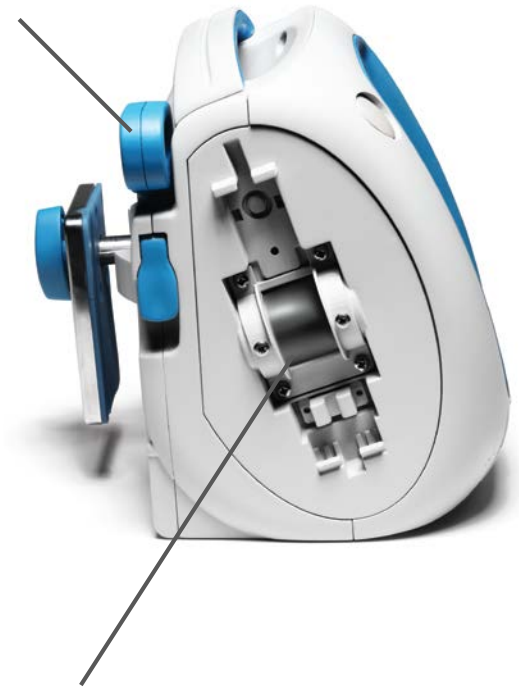

**Volumetrische vloeistofoediening**

Pompsysteem voor betrouwbare en automatische  
vochttoediening.

**Groot scherm**

Intuïtief, eenvoudige  
menustructuur voor makkelijk  
programmeren van therapie



# V.A.C. VERAFO™ Dressings



V.A.C. VERAFO™  
Dressings



V.A.C. VERAFO™  
Large Dressing



V.A.C. VERAFO  
CLEANSE™ Dressing



V.A.C. VERAFO CLEANSE  
CHOICE™ Dressing




V.A.C. VERAFO™  
Dressings

V.A.C. VERAFO™  
Large Dressing

V.A.C. VERAFO  
CLEANSE™ Dressing

V.A.C. VERAFO CLEANSE  
CHOICE™ Dressing

Wondtypen

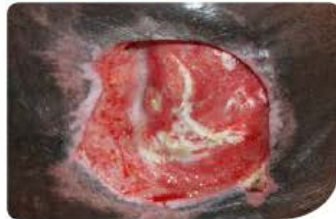

Wondeigenschap-  
pen

Open wonden, waaronder wonden met oppervlakkige ondermijningen of tunnelgebieden waarvan het distale aspect zichtbaar is.

Grote open wonden, waaronder wonden met oppervlakkige ondermijningen of tunnelgebieden waarvan het distale aspect zichtbaar is.

Wondholten of wonden met complexe vormen

Wonden met dik, fibrineus exsudaat, dood weefsel, infectieus materiaal en andere bioburden van de wond.

Hoofddoel(en)  
van de therapie

- Bij gebruik in combinatie met V.A.C. VERAFO™ Therapy: bevorderen van de verwijdering van infectieus materiaal en andere bioburden van de wond.
- Vorming van robuust granulatieweefsel.

- Bij gebruik in combinatie met V.A.C. VERAFO™ Therapy: bevorderen van de verwijdering van infectieus materiaal en andere bioburden van de wond.
- Vorming van robuust granulatieweefsel in grote wonden.

- Bij gebruik in combinatie met V.A.C. VERAFO™ Therapy: initiëren van actieve therapie en bevorderen van de verwijdering van infectieus materiaal en andere bioburden van de wond.
- Gemakkelijk toe te passen in tunnels en ondermijningen.

- Bij gebruik in combinatie met V.A.C. VERAFO™ Therapy: initiëren van actieve therapie en bevorderen van de verwijdering van infectieus materiaal, zoals dik, fibrineus exsudaat, dood weefsel en andere bioburden van de wond.
- Afhankelijk van de klinische beoordeling, kan deze combinatie worden overwogen wanneer chirurgisch debridement niet mogelijk of ongeschikt is.

# Veel toegepaste vloeistoffen bij instillatie



Fysiologisch zout



Advacyn®



Prontosan®  
(Polyhexanide 0,1% + Betaine)

Er is ook instillatie mogelijk met diverse andere vloeistoffen (bijv. azijnzuur)

<sup>1</sup> Negative-Pressure Wound Therapy with Instillation: International Consensus Guidelines. Kim PJ, Attinger CE, Steinberg JS et al. Plast Reconstr Surg 2013;132:1569-1579

<sup>2</sup> Brinkert D. et al, Negative Pressure Wound Therapy with Saline Instillation, 131 Patient Case Series, Int Wound J, 2013 Dec; 10(s1):56-60.

## Casuïstiek





# Casus Geïnfecteerde buikwond



Patiënte met buikwond na  
Gastric Bypass en  
Buikwandplastiek  
Buikwandplastiek is gaan  
infecteren.

Necrose, wond riekt,  
ondermijningen



# Start V.A.C. VERAFLLO™ Therapy op 18-07-16




- Gekozen voor de Cleanse Choice™ Dressing.
- Wond open gelegd door plastisch chirurg



# Eerste verbandwissel op 18-07-2016



# Tweede verbandwissel op 21-07-2016

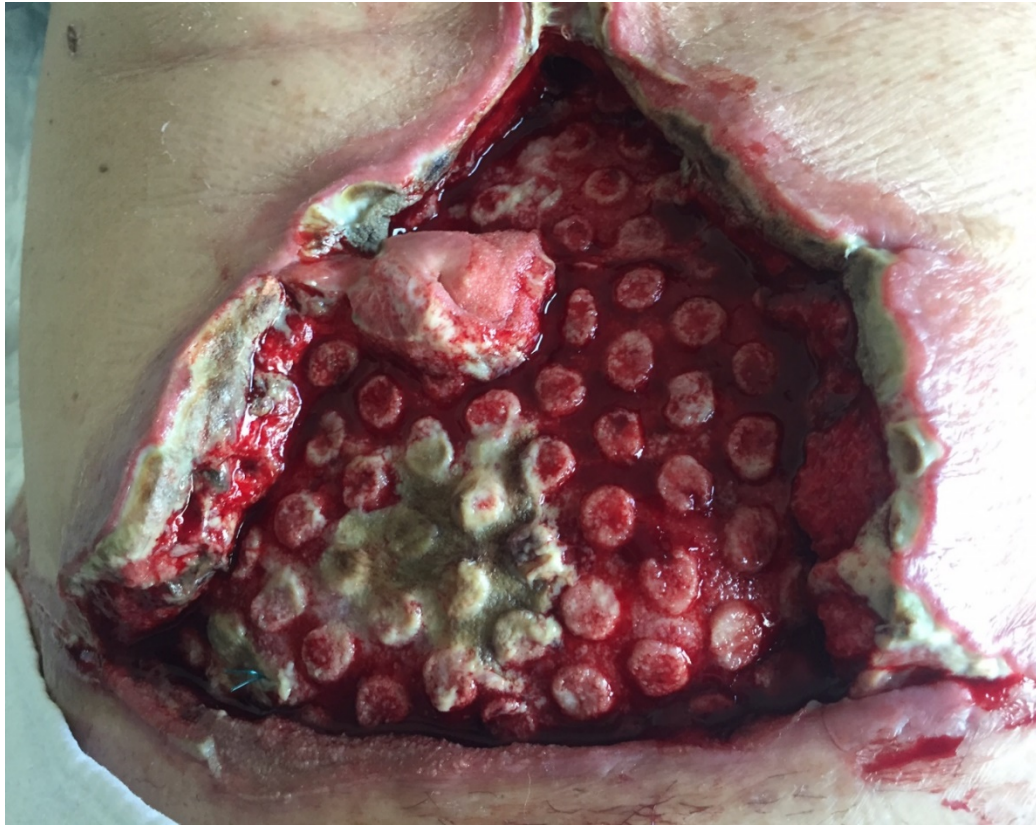

- Wond komt meer naar de oppervlakte.
- Doorbloeding is beter.
- Ondermijningen groeien goed dicht
- Nog een klein deel vloeibaar necrose.
- Er kon worden gestopt met Cleanse Choice™ Dressing
- Start ACTIV.A.C.™



08-08-2016



- Prachtig resultaat na slechts 3 weken
- Wond is op huidniveau
- V.A.C.® Therapy kon gestopt
- Start gelling fibre verband





*a GD Medical Pharma company*